

Maladie	Analyte	Méthode	Type de matrice	Précautions lors du prélèvement	Critère d'acceptation	Délai d'acheminement recommandé	Commentaire
BVD	ARN viral	PCR	-Sérum	Tube sec (bouchon rouge)	Quantité minimal 2ml	8 jours à 5°C±3°C	Virus fragile éviter de congeler les prélèvements
			-Sang total	Tube EDTA (bouchon violet)	Quantité minimal 2ml	8 jours à 5°C±3°C	Virus fragile éviter de congeler les prélèvements
			-Biopsie auriculaire	Trocart avec un opercule métallique et en dessous un tube plastique		< 7 jours à 5°C±3°C  >7 jours congélation à -20°C	Au delà du délai, le prélèvement peut être considéré comme dégradé et le résultat rendu sous réserve  -Au delà de 15 jours aucune biopsie ne sera mise en analyse.
FCO	ARN viral	PCR	-Sang total	Tube EDTA (bouchon violet)	Quantité minimal 2ml	4 jours à 5°C±3°C	Au delà du délai, le prélèvement peut être considéré comme dégradé et le résultat rendu sous réserve